

Information angående kunder som ska uppdatera till Opus 7

Denna information gäller DentalEye-kunder som ska uppdatera sitt Opus journalsystem till version 7 och kör DentalEye med MS SQL server 2005 eller äldre. I synnerhet kunder vars DentalEye-databas ligger i samma SQL-instans som Opus databas. Instruktionen nedan är avsedd för nätverkstekniker med erfarenhet av MS SQL server.

Att tänka på innan uppdateringen till Opus 7

Se till att ta en säkerhetskopia på både Opus och DentalEye-databaserna innan uppgraderingen påbörjas. Gör lämpligen en SQL backup till en *.BAK fil.

Vad händer vid uppdateringen till Opus 7?

För de kunder som har sin DentalEye-databas i samma instans som Opus kommer uppdateringen göra att DentalEye-databasen inte går igång efter uppdateringen. Detta sker eftersom Opus-uppdateringen lägger in MS SQL 2008 och inte tar hänsyn till att det kan finnas andra databaser i instansen. Den nya instansen har samma namn som den gamla där DentalEye-databasen ligger kvar och den gamla kan därmed inte köras igång längre.

Hur får man igång DentalEye efter uppdateringen?

Vi rekommenderar att man installerar en ny instans av MS SQL 2008 som man namnger DENTALEYE. Återläs därefter backupfilen (*.BAK) till den nya instansen mha Management Studio. Peka därefter om klient-datorerna till den nya server-instansen under System | Lokal databas | Ställ in lokal databas.

Om du inte har tillgång till en aktuell *.BAK fil (t ex om kunden försökt sig på uppdatering själv utan att ta kopia först) kan man göra en Attach på databas-filerna direkt: Sök rätt på mdf- och ldf-filerna för DentalEye-databasen och kopiera dessa till den nya instansens Data-mapp (eller där du vill att de ska ligga). Gå in i Management Studio och gör Attach på mdf-filen i den nya DentalEye-instansen.

Tveka inte att kontakta oss om du är tveksam över något eller har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning

DentalEye AB

2011-02-23 Tomas Sundbom