

Hur du registrerar licensnyckel i DentalEye 3.1

När behöver man registrera licensnyckel?

DentalEye kräver en giltig licensnyckel för att fungera. När du har installerat DentalEye från CD-skivan eller USB-minnet fungerar programmet under en viss tid, men därefter behövs en licensnyckel.

Licensnyckeln fungerar den tid som den gjorts för, efter denna tid fungerar inte bildfångst i programmet. I god tid före licensnyckelns datum har överskridits kommer programmet att varna dig att det behövs en ny licensnyckel.

OBS två olika metoder beskrivs nedan:

Manuell uppgradering av licensnyckel i DentalEye

Under menyn SYSTEM – INSTÄLLNINGAR hittar du fliken för LICENS. Klicka på UPPGRADERA LICENS.

När man fyller i uppgifterna om namn och licensnyckel är det viktigt att det fylls i exakt som det anges, det gäller punkt och mellanslag också.

Uppgradering av licensnyckel från fil

Din licensnyckel kan levereras som en fil som bifogats till ett E-post meddelande. Spara den bifogade filen till Skrivbordet.

Under menyn SYSTEM – INSTÄLLNINGAR hittar du fliken för LICENS. Klicka på UPPGRADERA LICENS, klicka sedan på knappen FRÅN FIL. Gå till Skrivbordet och välj den fil som innehåller licensnyckeln.

Om du har ett nätverk

Om fler än en PC har DentalEye installerat i ett nätverk så behöver uppgraderingen av licensnyckel endast ske på en PC.

Om Licensnyckeln inte godkänns av programmet

Oftast beror det på att namnet eller licensnyckeln inte skrivits in rätt. Lägg märke till:

1=ett

I=Stora I

l=lilla L

0=noll

O=Stora O